

# Informationsblatt zum Probenversand

## FÜR PATIENTEN

Die innere Box des Paketes enthält Probenröhrchen, die mit einer sterilen Nährlösung gefüllt sind, um Ihre Gewebeprobe nach der Entnahme zu schützen und zu stabilisieren. Diese ist unbedenklich und sollte verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt werden.



Bitte bewahren Sie die Probenröhrchen in einem normalen Kühlschrank bei ca. 4 – 8 °C auf und nehmen Sie diese mit der gesamten Verpackung und den beiliegenden Papieren mit ins Krankenhaus oder die Praxis. Es befinden sich außerdem zwei Kühlelemente in der Box. Abhängig von der Jahreszeit werden diese unterschiedlich gelagert:

### **Sommerzeit** (April bis Oktober):

Bitte bewahren Sie die beiden Kühlelemente im Gefrierfach (bei ca. - 15 °C) auf.

### **Winterzeit** (November bis März):

Bitte lagern Sie eines der Kühlelemente im Gefrierfach (bei ca. - 15 °C) und das zweite im Kühlschrank (bei ca. 5 °C).

Bei Ihrer Aufnahme im Krankenhaus oder der Anmeldung in der Praxis, geben Sie bitte die Probenröhrchen und die vollständige Verpackung an das Stationspersonal weiter und informieren Sie die Mitarbeiter über die nötige Kühlung. Weisen Sie auch auf das Informationsblatt zum Probenversand für Klinikmitarbeiter hin.

# Infomationsblatt zum Probenversand

FÜR KLINIKMITARBEITER

Vielen Dank, dass Sie Ihren Patienten darin unterstützen, eine prä-therapeutische Substanztestung an individuellen Tumor-Organoiden bei ASC Oncology durchzuführen.

## 1 PROBENVORBEREITUNG

Bitte transferieren Sie eine **frische Tumorprobe** (Gewebefragment oder Biopsie-Nadeln) unter sterilen Bedingungen in eines oder mehrere der vorbereiteten und mit der Nährlösung befüllten Probenröhrchen. Das Fragment sollte vollständig von der Flüssigkeit umgeben sein.

### WICHTIG!

Die Tumorprobe sollte innerhalb von 24 – 72 h nach Entnahme bei uns eintreffen.  
Die Probe sollte gekühlt, **NICHT eingefroren und NICHT fixiert** werden.

## 2 PROBENKÜHLUNG

Unsere Verpackung enthält zwei Kühlelemente. Abhängig von der Jahreszeit werden diese unterschiedlich gelagert:

### **Sommerzeit** (April bis Oktober):


Bitte bewahren Sie die beiden Kühlelemente im Gefrierfach (bei ca. - 15 °C) auf.

### **Winterzeit** (November bis März):

Bitte lagern Sie eines der Kühlelemente im Gefrierfach (bei ca. - 15 °C) und das zweite im Kühlschrank (bei ca. 5 °C).

### 3 VERSANDVORBEREITUNG

**(a)** Bitte legen Sie die Probenröhrchen inkl. Umverpackung in die braune Probenbox.  
**(b)** Legen Sie ein Kühlelement in den Versandkarton und **(c)** legen Sie die Probenbox isoliert zwischen zwei silbernen Polsterfolien darauf. Legen Sie das zweite Kühlelement darauf und zuletzt eine silberne Polsterfolie. Schließen Sie den Versandkarton, legen Sie alle Papierunterlagen dazu und verschließen Sie ihn.

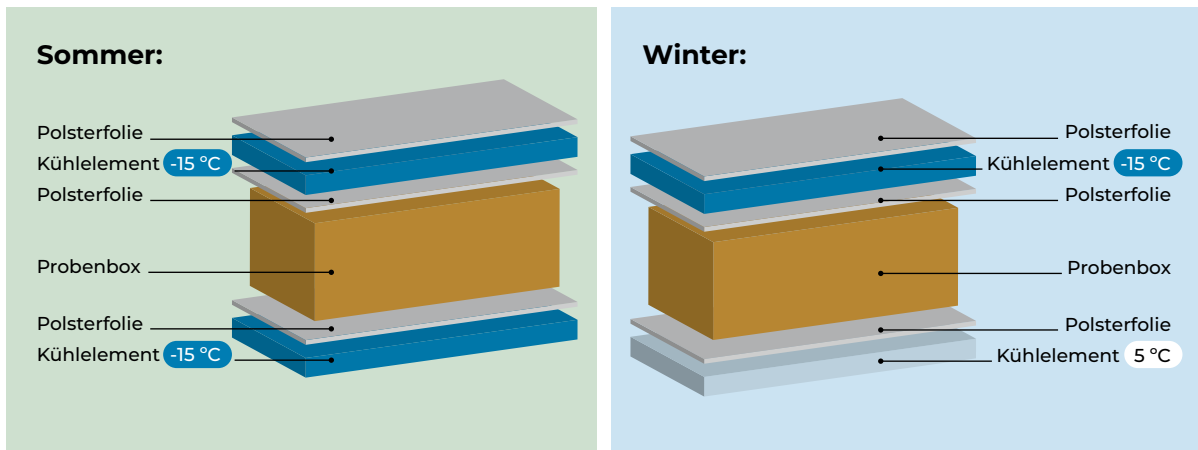

### 4 PROBENVERSAND

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte **Retourenlabel** und wählen Sie folgende Nummer, um die Abholung zu beauftragen: **+49 30 235 9467 66**. Ab Beauftragung benötigt der Kurierdienst etwa 2 Stunden bis zur Abholung. Die Rechnung erhalten wir.